

PIL OKZF AT/HU v01 200327	Fira Sans Regular 18 pt	CO M0 Y0 K90	
PIL Okuzell forte eye drops AT/HU	Fira Sans Regular 11,5 pt	CO M0 Y0 K80	
Maße: 130 x 180 mm	Fira Sans Regular 9 pt	C90 M52 Y0 K0	Pantone 285 C
	Fira Sans Regular 7 pt	Stanze	
	Fira Sans Light 7 pt		



Gebrauchsanweisung

OKUZELL

forte

Augentropfen

Sterile, feuchtigkeitsspendende ophthalmische Lösung mit Natriumhyaluronat 0,4% 10 ml Flasche

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat 0,4%; zweibasiches Natriumphosphatdodecahydrat; monobasiches Natriumphosphatmonohydrat; Natriumchlorid; Wasser.

Medizinprodukt
Ohne Konservierungsmittel

Wie ist das Produkt beschaffen?

Okuzell forte Augentropfen sind eine sterile ophthalmische Lösung. Die Packung enthält eine 10 ml Flasche, was mehr als 250 Tropfen entspricht. Die Flasche ist ausgestattet mit dem innovativen und patentierten Multidosis Ophthalmic Squeeze Dispenser - ophthalmischer Dosierer (OSD), der eine konservierungsmittelfreie Formulierung ermöglicht. OSD hält potenziell schädliche Bakterien von der Lösung, die bis zu 120 Tage nach dem ersten Gebrauch steril bleibt fern.

Was sind Okuzell forte Augentropfen?

Okuzell forte Augentropfen sind eine 0,4% ophthalmische Lösung auf Basis von hochmolekularem Natriumhyaluronat, hergestellt durch biotechnologische Synthese. Natriumhyaluronat hat mukomimetische, mukoadhäsive und viskoelastische Eigenschaften, die die Tränenfilmstabilität verbessern und die Augenoberfläche angenehm, befeuchtet, hydratisiert und geschützt halten.

Wann können Okuzell forte Augentropfen angewendet werden?

Die feuchtigkeitsspendenden und schützenden Eigenschaften von Natriumhyaluronat helfen bei Reizungen, Trockenheit, Brennen sowie einem Fremdkörpergefühl der Augen. Ursachen dafür können sein:

- Umwelteinflüsse wie Wind, Sonne, trockene Luft, Salzwasser, Rauch, übermäßiges Licht, Klimaanlage, Heizung,
- längere Computernutzung,
- augenchirurgische Eingriffe,
- Konjunktivitis,
- häufiges und längeres Tragen von Kontaktlinsen.

Wie sollten Okuzell forte Augentropfen angewendet werden?

Je nach Notwendigkeit 2-3 mal täglich 1 Tropfen in die Augen. Träufeln Sie einen Tropfen in das Auge indem Sie leichten Druck auf die Flasche ausüben.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

- Nicht verwenden, wenn der Behälter beschädigt ist.
- Nicht parallel mit Produkten verwenden, die quartäre Ammoniumsalze enthalten.
- Nicht verwenden bei Empfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile
- Nicht verwenden nach Ablauf des auf der Flasche und auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums.
- Das Auge nicht mit der Spitze der Flasche berühren.
- Nach der Verabreichung kann es in seltenen Fällen aufgrund der Viskosität der Lösung zu einer leichten vorübergehenden Verschwommenheit des Sehvermögens kommen. Es empfiehlt sich daher, einige Sekunden vor einer Aktivität, die eine klare Sicht erfordert, zu warten.
- Warten Sie mindestens 10-15 Minuten vor der Verabreichung anderer äußerlich anzuwendender ophthalmischer Medikamente.
- Die Flasche 120 Tage nach dem ersten Öffnen entsorgen.
- Nach Aufbrauchen die Flasche bitte ordnungsgemäß entsorgen.
- Außer Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.
- Nicht schlucken.
- Das Produkt ist nur für den ophthalmischen Gebrauch bestimmt.
- Bei Raumtemperatur lagern.
- Das Produkt ist normalerweise für einen durchgehenden Gebrauch für höchstens 30 Tage bestimmt; Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Das Produkt enthält Phosphate. Bei einigen Patienten mit deutlich beschädigten Hornhäuten wurden seltene Fälle von Verkalkung der Hornhaut während der Anwendung von Augentropfen mit Phosphaten berichtet; Es wird daher nicht empfohlen, dass diese Augentropfen von Patienten mit schwerer Beschädigung der Hornhautoberfläche (ausgeprägte Erosion der Hornhaut oder Hornhautgeschwür) benutzt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Pharmaselect Handels GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20
A-1020 Wien, Email: info@pharmaselect.at



NTC SRL
Via Luigi Razza 3
20124 Mailand Italien

Änderungsdatum:
07/2018

LHHYS10300
OKZFATU101-01-2002

OKUZELL

forte

szemcsepp

Steril, hidratáló szemcsepp 0,4%-os nátrium-hialuronát oldattal, 10 ml tartályban

Összetétel: nátrium-hialuronát 0,4%, kétbázisú nátrium-foszfát-dodekahidrát; egybázisú nátrium-foszfát-monohidrát; nátrium-klorid, víz

Orvostechnikai eszköz. Tartósítószermentes

Mit tartalmaz a csomag?

Okuzell forte szemcsepp, steril szemészeti oldat. A csomagban egy 10 ml-es tartály található, tartalma több mint 250 csepp. A tartályt az innovatív és szabadalmaztatott, tartósítószermentes Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD) többadagos adagolóval látták el. Az OSD távol tartja a káros baktériumokat az oldattól, amely így akár 120 napig is steril marad az első használat után.

Mi az Okuzell forte szemcsepp?

Az Okuzell forte szemcsepp biotechnológiai szintézissel előállított, nagy molekulatömegű nátrium-hialuronát 0,4%-os szemészeti oldata. A nátrium-hialuronát muko-mimetikus, muko-adhezív és viszkoelasztikus tulajdonságai révén javítja a könnyfilm stabilitását, a szemfelszín síkosításával, hidratálásával és védelmével helyreállítja annak komfortérzetét.

Mikor használja az Okuzell forte szemcseppet?

A nátrium-hialuronát hidratáló és védő tulajdonságai enyhítik a szem irritációját, szárazságát, az égő- és idegentest érzést, melyet olyan környezeti tényezők okoznak, mint a szél, a nap, a száraz levegő, sós víz, füst, túl erős fény, légkondicionálás, fűtés, túl sokáig tartó számítógép-használat, de használható szemészeti műtétek, kötőhártya-gyulladás, gyakori vagy hosszan tartó kontaktlencse-viselés esetén is.

Hogyan használjuk az Okuzell forte szemcseppet?

1-1 csepp mindkét szembe, szükség szerint naponta 2-3 alkalommal. A tartály enyhe nyomásával cseppentsünk egy cseppet a szembe.

Figyelmeztetések

- Ne használja, ha a tartály sérült.
- Ne használja együtt kvaterner ammóniumvegyületekkel
- Ne használja bármelyik összetevővel szembeni érzékenység esetén
- Ne használja a tartályon és a külső csomagoláson látható lejárati idő után.
- Ne érjen a szemhez a tartály csúcsával.
- Az oldat viszkózitása miatt használat után ritka esetekben átmenetileg homályos látás tapasztalható. Ezért tanácsos használat után pár másodpercig várni, mielőtt éles látást igénylő tevékenységbe kezdünk.
- A szemcsepp használata és bármely más külső, szemészeti gyógyszer használata között legalább 10-15 perc teljen el
- A felnyitást követő 120. nap után dobjuk el a tartályt
- A kiürült tartályt a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobjuk ki.
- Gyermekektől távol tartandó.
- A szert ne nyelje le.
- A termék csak szem ápolására használható.
- Szobahőmérsékleten tárolandó.
- A terméket általában 30 napot meg nem haladó, folyamatos használatra szánták; ha a tünetek ennél tovább fennállnak, forduljunk orvoshoz.
- Foszfátokat tartalmaz. Fokozottan sérült szaruhártyával élő betegek ritka esetben a szaruhártya meszesedéséről számoltak be foszfátokat tartalmazó szemcsepp használata után; a szemcsepp használatát ezért nem javasoljuk súlyosan sérült szaruhártya (fokozott erózió vagy a szaruhártya fekélye) esetén.

További információ:

Pharmaselect Handels GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20,
A-1020 Bécs, Ausztria,
Email: info@pharmaselect.at



NTC SRL, Via Luigi Razza 3
20124 Milano, Olaszország

Felülvizsgálat
dátuma: 2018. 07.

LFHYS10300
OKFATHU101-01-2002